


# SARS-CoV-2 CE

## Antigen Rapid Test Kit

(Colloidal Gold Immunochromatography)

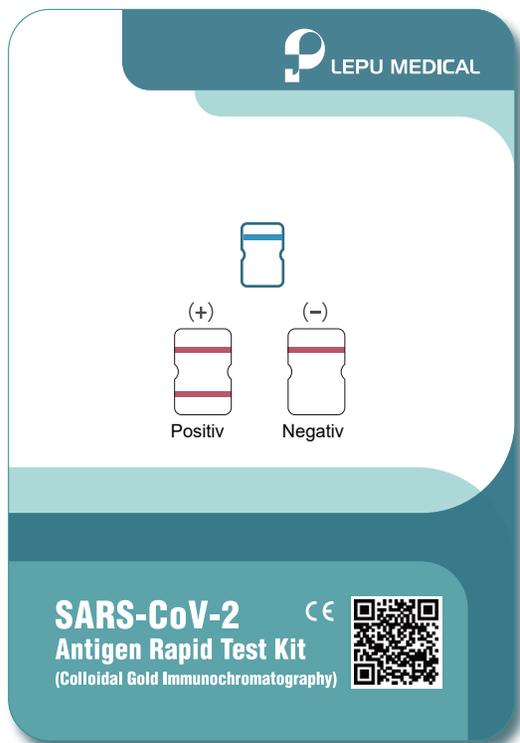

- ① Nicht-invasiv
- ② Einfach zu benutzen
- ③ Hohe Genauigkeit
- ④ Preiswert
- ⑤ Schnell - Ergebnis in 15 Minuten
- ⑥ Praktisch - Keine Geräte notwendig

Diagnostische Sensitivität\*: 92,00% (CI 95%: 83,63%-96,28%)

Diagnostische Spezifität\*: 99,26% (CI 95%: 95,92%-99,87%)

\*Studiendaten siehe Gebrauchsanweisung



Hospital



Test Site



Airport



Station



Hotel




Corporation




Mass  
Screening


## Anleitung

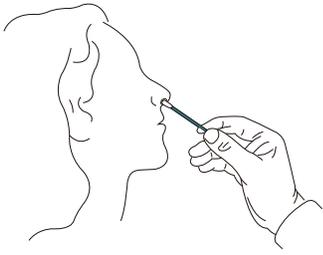


**Schritt 1:** Entnehmen Sie die Probe anhand des beiliegenden Stäbchens.

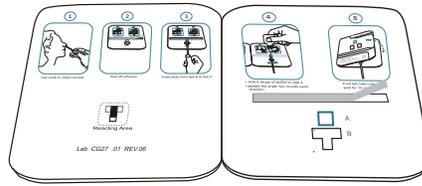


**Schritt 2:** Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Klebestreifens.

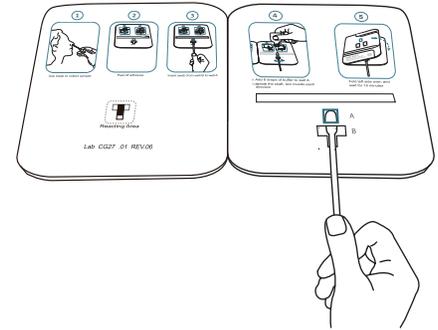

**Schritt 3:** Schieben Sie die Probe durch die Öffnung von Vertiefung B in Vertiefung A.

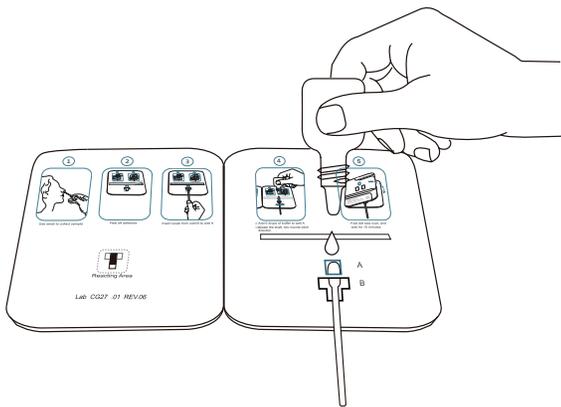

**Schritt 4:** Geben Sie 6 Tropfen Verdünnungsmittel in Vertiefung A. Drehen Sie den Abstrich 2x in jede Richtung.

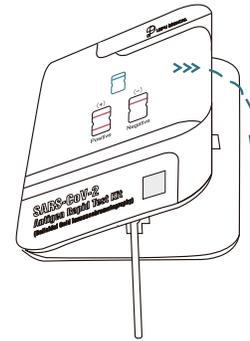


**Schritt 5:** Kleben Sie die linke und rechte Seite zusammen. Das Testergebnis wird in 15 Minuten angezeigt.

## Ergebnisinterpretation

**Positiv**

(+)

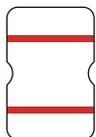


**Negativ**

(-)



**Falsch**

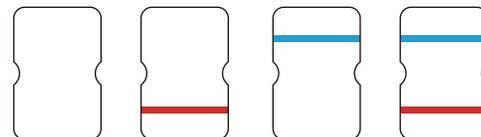

**SANIDOC24.at**